




Türkçe

Döküm UCLA

Sembol	Açıklama	Sembol	Açıklama	Sembol	Açıklama
	Ürün Ölçüsü		Tekrar işlenmez		Yırtık, Delik, Hasarlı Ambalajları Kullanmayın
	Ürün Kodu		Steril Değildir		
	Ürün LOT Numarası		Tek Kullanımlıktır		FDA İşaretlemesi
	Üretim Tarihi				
	Son Kullanma Tarihi		Kullanım Kılavuzuna Başvurun		
	Miktar		Doğrudan Güneş Işığında Korunmalıdır		Avrupa Topluluğu Temsilciliği
	Üründe Kullanılan Malzeme		Kuru Yerde Saklayın		

 CD2201001, CD2201002, CD2201003, CD2201004, CD2201005, CD2201006, CD2201017, CD2201018, CD2201019, CD2201020, CD2201021, CD2201022, CD2202001, CD2202002, CD2202003, CD2202004, CD2202005, CD2202006, CD2202013, CD2202014, CD2202015, CD2202016, CD2202017, CD2202018.

 JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. - Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3.291 - Cidade Industrial - 81.270-200 - Curitiba - Paraná - Brezilya - CNPJ : 00.489.050/0001-84
Marka Adı: Neodent - Brezilya Endüstrisi

 ve  için etikete bakın

 Intradent AG, Peter Merian-Weg 12, CH-4052, Basel, İsviçre

Teknik Müdür: Julianne O. C. Lechechem CRF-PR 10.307

360.014.04

Bu cihaz, implant üzerine Protez alanında uzmanlaşmış profesyoneller tarafından uygulanması gereken özel bir prosedür için tasarlanmıştır. Üründen en iyi sonucu elde etmek için, ürünü uygun teknik bilgi ile kullanın ve ameliyathane de dahil olmak üzere her zaman uygun koşullar altında kullanın.

TANIM

Döküm UCLA, tamamen POM (Polioksümetilen) malzemesinden üretilen bir protez dayanağıdır. Aşağıdaki tabloya göre köprü (döner) ve kuron (dönmez) için modelleri mevcuttur. Döküm UCLA, laboratuvar kullanımı için bir vida ile birlikte sunulur.

Protez Ara Yüzü	Model	Protez Platformu
EF	Kuron için (dönmez)	3.3 mm
		4.1 mm
		5.0 mm
	Köprü için (döner)	3.3 mm
		4.1 mm
		5.0 mm
IF	Kuron için (dönmez)	NP (3.5 mm)
		SP (4.5 mm)
		SP (5.5 mm)
	Köprü için (döner)	NP (3.5 mm)
		SP (4.5 mm)
		SP (5.5 mm)

NP platformlu modellerin vidaları sarı renk ile belirtilmiştir.

KULLANIM TALİMATLARI

İmplant sistemi, çiğneme fonksiyonunu ve estetiği iyileştirmek için proteze destek sağlamak için cerrahi olarak maksillaya veya mandibulaya yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır.

UYGULAMALAR

Döküm UCLA, kuron (dönmez) ve köprüler (döner) için implant üzerine vida tutuculu ve simanlı protezlerin yapımı için kullanılır. Laboratuvar aşamasında alçı modeller ve analoglar üzerinde kullanılır. Dökümden sonra, UCLA kalıcı protezin parçası haline gelir.

KONTRENDİKASYONLAR

Bu ürün; interoklüzal boşluğun ve implantın üç boyutlu pozisyonunun yetersiz olduğu durumlarda kontrendikedir.

KULLANIM

Döküm UCLA'nın iki aşamalı prosedürlerde kullanılması için yumuşak dokular üzerinde bir iyileşme dayanağı kullanılarak bir ön hazırlık gerçekleştirilebilir. Laboratuvar aşamasında çalışma vidasını, intraoral fiksasyon için ise steril vidayı kullanın. Yerleştirme için aşağıdaki tabloda gösterilen anahtar ve tork önerilerini izleyin.

Protez Ara Yüzü	Önerilen Tork (N.cm)	Anahtar
EF	32	Altigen 1.2
IF	20	

Döküm UCLA aşağıdaki şekillerde kullanılabilir: İmplantın ağız içine yerleştirilmesinden sonra, uygun tekniklere göre ilgili ölçü postunun yardımıyla ağız içinin ölçü alma işlemi ile ürünün konumunu modele transfer edin. Döküm UCLA'yı analoğa vidalayın ve mevcut interoklüzal boşluğa göre özelleştirin. Tanısal amaçlı mum (wax-up) uygulayın. Elde edilen standart, döküm işleminde

kullanılacak olan alaşıma uygun kapağa dahil edilmektedir. Bu nedenle, akrilasyon veya porselen uygulamasına temel olacak yapı elde edilir. Protez yapısının pasiflik ve adaptasyon testleri gerçekleştirilmelidir.

SUNUM VE STERİLİZASYON

Bu ürün, tek kullanımlık olup steril olmadan ve ambalaj içerisinde tek olarak veya beşli olarak sunulur. Döküm UCLA, yalnızca laboratuvar aşamasında kullanılmak üzere bir vida ile tedarik edilir. Döküm işleminden sonra elde edilen ürünün intraoral fiksasyonu için bir steril vida edinilmelidir.

ÖNLEMLER

- Yerleştirmeden önce ürünün, implantın protez ara yüzü ile denk geldiğinden emin olun.
- NP platformlu dayanakların molar bölgeye yerleştirilmesi yalnızca çoklu restorasyonlar için endikedir.
- Daimi protezin ağız içine yerleştirilmeden önce temizlenmesi tavsiye edilir.
- Bu ürün, geçici bir plastik parça olarak kullanılmamalıdır.
- Metal seçimi, olgular için muhtemel olumsuz olayları en aza indirmek için bir diş hekimi tarafından yapılmalıdır.
- Yerleştirme sırasında, ürünün implantın yerleştirme eksenini ile hizalandığından emin olun. Ürünün implant üzerine düzgün bir şekilde oturduğundan emin olun. Bunun için paralel teknik ile periapikal röntgen kullanılması tavsiye edilir.
- Protez ara yüzü ve protez bileşeni ile uyumlu bir protez vidası kullandığınızdan emin olun.
- İmplant stabilitesinin; implant kullanım talimatlarına göre protez dayanağı yerleştirme torku ve fonksiyonel yüklemeye mukavemet gösterecek yeterlilikte olduğundan emin olun.
- Protez yapısının malzeme seçiminde, hastanın genel özelliklerini göz önünde bulundurulmalıdır.
- Hemen yüklemeye için, yerleştirilmiş implantın tork değerini kontrol edin.
- Kullanılan protez bileşeni üzerinde belirtilen torku kontrol edin. Önerilenden daha yüksek yerleştirme torkunun ve uygun olmayan Anahtarların kullanılması malzemelere zarar verebilir ve sistemi kullanılamaz hale getirebilir.
- Cerrahi planlama ve/veya yetersiz protez; implantın kaybedilmesi veya kırılması, dayanakların ve/veya protez vidalarının gevşemesi veya kırılması gibi sistem başarısızlığı ile sonuçlanarak implant/protez düzeneğinin performansını tehlikeye atabilir.
- İnteroklüzal boşluğu yetersiz veya fazla olmaması için muhlama (wax-up) sırasında dikkat edilmelidir.
- Bu ürün tek kullanımlıktır.
- Bu ürünün tekrar kullanılması şunlara neden olabilir: kalıntı ürünlerin, mikroorganizmaların ve/veya önceki kullanımlardan ve/veya yeniden işlemlerden kaynaklanan maddelerin olumsuz biyolojik etkileri; ürünlerin fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerindeki makro ve mikro yapısal değişiklikler - istenen işlevselliğe riske atabilir. Bu ürünün tekrar kullanılmasında, ürünün güvenliği ve etkinliği garanti edilmez ve ürünlere ilişkin tüm garantiler reddedilir.

- Ambalajın hasarlı olması durumunda ürünü kullanmayın.
- Son kullanma tarihi geçmiş ürünü kullanmayın.
- Her prosedürden önce, parçaların düzgün bir şekilde oturduğundan emin olun.
- Protezi yerleştirdikten sonra implant/protez düzeneğinin bozulmasından kaçınarak pasiviteyi kontrol edin ve oklüzal ve interproksimal ayarlama yapın.
- Parçaların olgu tarafından yutulmadığından veya aspire edilmediğinden emin olun.
- Her prosedürden önce kullanım ömürlerini göz önünde bulundurarak cerrahi aletlerin durumlarını kontrol edin. Hasarlı, işaretleri silinmiş, keskinliği azalmış, deformasyona uğramış ve aşınmış aletleri yenisi ile değiştirin.
- Daima ayın marka ve grubundaki ürün dizilerini kullanın. Diğer üreticilere ait protez dayanaklarının ve/veya parçaların kullanılması, sistemin kusursuz bir şekilde çalışmasını garanti etmez ve herhangi bir ürün garantisini muaf tutar.
- Ürünlerin kullanım talimatlarına göre kullanılması uzmanların sorumluluğu altındadır.

YAN ETKİLER

Ürün, kullanım talimatlarına göre kullanıldığı takdirde herhangi bir yan etki görülmemektedir.

OPERASYON SONRASI ÖNLEMLER VE BAKIM

Bu talimatların sağlanması sorumlu uzmanın sorumluluğu altındadır.

Hastanın, ameliyat sonrası profesyonel bir tıbbi gözleme ihtiyacı olduğu ve önlemler, hijyen ve ilaç reçeteleri ile ilgili kurallara uyması talimatlarının verilmesi önemlidir. Periyodik ziyaretler ve röntgen muayeneleri ile takip ihtiyacını belirleyin.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Bu ürün kullanılacağı zamana kadar temiz ve kuru bir yerde, doğrudan güneş ışığından korunarak ve oda sıcaklığında orijinal ambalajında depolanmalıdır.

MALZEMENİN İMHASI

Diş implantı yerleştirme cerrahi uygulamalarında kullanılan her ürün ve malzeme, bu ürünleri kullanan kişilerin sağlığını tehlikeye atabilir. Lütfen yürürlükteki mevzuatı gözden geçirin ve yürürlükte mevzuat uyarınca davranın.

SON KULLANMA TARİHİ

Her bir ürünün son kullanma tarihi ürün etiketi üzerinde belirtilmiştir.

© 2019 - JGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Tüm hakları saklıdır.

Federal (ABD) yasa, bu cihazın lisanslı bir diş hekimi veya hekim tarafından veya emriyle satılmasını kısıtlar.

Ürünler, her ülkede bulunmayabilir. Lütfen yetkili dağıtıcınızı ile irtibata geçin.