

nubo™


CE 0344

Türkçe

Analog

Sembol	Açıklama	Sembol	Açıklama	Sembol	Açıklama
	Ürün Ölçüsü		Tekrar İşlenmez		Yırtık, Delik, Hasarlı Ambalajları Kullanmayın
	Ürün Kodu				
	Ürün LOT Numarası		Steril Değildir		FDA İşaretleme
	Üretim Tarihi		Tek Kullanımlıktır		
	Son Kullanma Tarihi		Kullanım Kılavuzuna Başvurun		
	Miktar		Kuru Yerde Saklayın		Avrupa Topluluğu Temsilciliği
	Üründe Kullanılan Malzeme		Doğrudan Güneş Işığından Korunmalıdır		

 CD0101001, CD0101002, CD0101003, CD0102001, CD0102002, CD0106001, CD0106002, CD0107001.

 JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. - Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3.291 - Cidade Industrial - 81.270-200 - Curitiba - Paraná - Brezilya - CNPJ : 00.489.050/0001-84

Marka Adı: Neodent - Brezilya Endüstrisi

Anvisa Kaydı:

 ve  için etikete bakın

 Intradent AG, Peter Merian-Weg 12, CH-4052, Basel, İsviçre

Teknik Müdür: Julianne O. C. Lechechem CRF-PR 10.307

360.035.03

Bu cihaz, diş implantı alanında uzmanlaşmış profesyoneller tarafından uygulanan özel bir prosedür için tasarlanmıştır. Üründen en iyi sonucu elde etmek için, ürünü uygun teknik bilgi ile kullanın ve ameliyathane de dahil olmak üzere her zaman uygun koşullar altında kullanın.

TANIM

Analoglar, laboratuvarında kullanılmak üzere titanyum alaşım Ti6Al4V-EL'den üretilen parçalardır. İmplant veya ara protez dayanaklarınıninkine benzer bir ara yüzü ve alçı veya taranmış modele uyumlu başka bir ara yüzü vardır. Aşağıdaki tabloda belirtilen protez ara yüzlerinde mevcuttur:

Ara Parça	Karşılık Gelen Ara Yüz Boyutu
EF İmplant	3.3 mm
	4.1 mm
	5.0 mm
IF İmplant	NP (dar)
	SP (standart)
EF Çok Üyeli Vida Tutuculu Dayanak	4.1 mm
	5.0 mm
IF Çok Üyeli Vida Tutuculu Dayanak 3.5	3.5 mm

NP Platform Analogları sarı renktedir.

KULLANIM TALİMATLARI

Bu ürün, implant üstü protezin hazırlanması için alçı veya taranmış modelin oluşturulmasında laboratuvar aşamasında, boyutların yeniden oluşturulmasında ve implantın veya ara protezin konumlandırılmasında kullanılmak üzere endikedir.

UYGULAMALAR

Analoglar, implant üstü protez veya ara protez dayanağı oluşturulurken boyutları belirlemek ve konumlandırma için kullanılır.

Seçilen protez ara yüzleri arasındaki uyumluluğu kontrol edin. Analoglar, aşağıda belirtilen protez ara yüzlerinde mevcuttur:

- İmplantlar için: EF (ExternalFit) ve IF (InternalFit)
- EF ve IF Dayanakları için: Çok Üyeli Vida Tutuculu Dayanak
- EF Dayanakları için: Çok Üyeli Vida Tutuculu Dayanak 5.4
- IF Dayanakları için: Çok Üyeli Vida Tutuculu Dayanak 3.5

KONTRENDİKASYONLAR

Kullanım talimatlarına uygun ve doğru bir şekilde kullanıldığında herhangi bir yan etkisi yoktur.

KULLANIM

ALÇI MODEL: Uygun teknikler ile ilgili Ölçü Postunu kullanarak implant veya protez dayanağın ölçüsünü alın. Ölçüyü aldıktan sonra sonra, kaşık üzerinde Analogu ilgili Ölçü Postuna takın/vidalayın. Gerekliğinde vidasını sıkmak için Ölçü Postu için uygun anahtarı/bağlantıyı kullanın. Hastanın yumuşak dokusunu taklit eden diş eti maskesini döktükten sonra alçıyı tüm Analogu kaplayacak şekilde model üzerine

dökün. Alçı sertleştikten sonra, modeli alçıdan çıkarın. Ölçü Postunu Analogdan sökün/çıkartın.

TARANMIŞ MODEL: Uygun teknikler ile ilgili Tarama Postunu kullanarak implant veya protez dayanağın ölçüsünü alın. Tarama işleminden sonra, planlamaya uygun analoğu kullanarak Visual Model Builder yazılımında tasarımı yapın. Basım için, 3D Rapid Shape yazıcı kullanılması endikedir. Taranmış model üzerinde Analogu ilgili boşluğa yerleştirin.

SUNUM VE STERİLİZASYON

Bu ürün, tek kullanımlık olup steril olmadan tedarik edilir, ambalaj içerisinde tek olarak sunulur.

NP Platform Analogu sarı renktedir.

ÖNLEMLER

- Analogun seçilen Ölçü Postu/Tarama Postu ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Protezi yaptıktan sonra Analog üzerine oturup oturmadığını kontrol edin.
- Cerrahi planlama ve/veya yetersiz protez; implantın kaybedilmesi veya kırılması, dayanakların ve/veya protez vidalarının gevşemesi veya kırılması gibi sistem başarısızlığı ile sonuçlanarak implant/protez düzeneğinin performansını tehlikeye atabilir.
- Bu ürün tek kullanımlıktır.
- Bu ürünün tekrar kullanılması şunlara neden olabilir: kalıntı ürünlerin, mikroorganizmaların ve/veya önceki kullanımlardan ve/veya yeniden işlemlerden kaynaklanan maddelerin olumsuz biyolojik etkileri; ürünlerin fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerindeki makro ve mikro yapısal değişiklikler - istenen işlevselliği riske atabilir. Bu ürünün tekrar kullanılmasında, ürünün güvenliği ve etkinliği garanti edilmez ve ürünlere ilişkin tüm garantiler reddedilir.
- Ambalajın hasarlı olması durumunda ürünü kullanmayın.
- Son kullanma tarihi geçmiş ürünü kullanmayın.
- Protezin yapımı sırasında, kullanılan protez dayanağı üzerinde önerilen torku takip edin. Aşırı veya eksik tork istenmeyen sonuçlara neden olabilir.
- Her prosedürden önce, parçaların mükemmel bir şekilde oturduğundan emin olun.
- Her prosedürden önce kullanım ömürlerini göz önünde bulundurarak cerrahi aletlerin durumlarını kontrol edin. Hasarlı, işaretleri silinmiş, keskinliği azalmış, deformasyona uğramış ve aşınmış aletleri yenisi ile değiştirin.
- Daima ayın marka ve grubundaki ürün dizilerini kullanın. Diğer üreticilere ait protez dayanaklarının ve/veya parçaların kullanılması, sistemin kusursuz bir şekilde çalışmasını garanti etmez ve herhangi bir ürün garantisini muaf tutar.
- Ürünlerin kullanım talimatlarına göre kullanılması uzmanların sorumluluğu altındadır.

YAN ETKİLER

Ürün, kullanım talimatlarına göre kullanıldığı takdirde herhangi bir yan etki görülmecektir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Bu ürün kullanılacağı zamana kadar temiz ve kuru bir yerde, doğrudan güneş ışığından korunarak ve oda sıcaklığında orijinal ambalajında depolanmalıdır.

MALZEMENİN İMHASI

Diş implantı yerleştirme cerrahi uygulamalarında kullanılan her ürün ve sarf malzeme, bu ürünleri kullanan kişilerin sağlığına tehlikeye atabilir. Lütfen yürürlükteki mevzuatı gözden geçirin ve yürürlükte mevzuat uyarınca davranın.

SON KULLANMA TARİHİ

Her bir ürünün son kullanma tarihi ürün etiketi üzerinde belirtilmiştir.

© 2019 - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Tüm hakları saklıdır.

Federal (ABD) yasa, bu cihazın lisanslı bir diş hekimi veya hekim tarafından veya emriyle satılmasını kısıtlar.

Ürünler, her ülkede bulunmayabilir. Lütfen yetkili dağıtıcınız ile irtibata geçin.